

Verarbeitungsempfehlung & technische Daten CopraGlaze



Technische Daten **Ausgabedatum: 12.07.2016**

Hersteller: Whitepeaks Dental Solutions GmbH & Co. KG
Langeheide 9 - 45239 Essen - Germany

Produkt / Produkttyp: CopraGlaze Shade und CopraGlaze Marker, Glasurpulver/Liquid zur Individualisierung und Charakterisierung von endgesinterten Zirkonrestaurationen sowie anschließendem Glanzbrand im Keramikofen

Produktform: Pulver in verschiedenen Farben, Liquid zum Anmischen des Pulvers

CE-Kennzeichnung: $\overline{\text{C}}$ 0483 (Medizinprodukt der Klasse IIa)

Anwenderkreis: eingewiesene Anwender mit zahntechnischer Ausbildung

Farbpalette:

Marker (markierend opak)

Marker oak brown
Marker walnut brown
Marker marone brown
Marker ebony black
Marker sunflower yellow
Marker viola violett
Marker laguna blue
Marker nightsky blue
Marker gunmetal grey
Marker ash grey
Marker goodwood green
Marker morning blue
Marker blood red
Marker pretty pink
Marker spruce green
Marker satin green
Marker magic orange
Marker caribbean turquoise
Marker seaweed green
Marker vulcano red

Shade (lasierend transluzent)

Shade sunrise
Shade sunset
Shade cotto
Shade cocos
Shade safari
Shade ocean
Shade lavender
Shade stone
Shade snow
Shade rose
Shade charcoal
Shade modify A
Shade modify B
Shade modify C
Shade modify D

Verarbeitung:

1. Farbpulver und Liquid mit Hilfe eines Pinsels zu einer pastenartigen Masse anrühren und nach Belieben auftragen.
2. 1. Glasurbrand (siehe Brenntabelle)
3. Glasurpulver und Liquid mit Hilfe eines Pinsels zu einer pastenartigen Masse anrühren und dünn aber deckend auftragen
4. 2. Glasurbrand
5. Punkt 3 und 4 wiederholen, falls erforderlich

Brenntabelle:

Trocknen min	Vorwärmen °C	Vorwärmen min	Aufheizen °C/min	Endtemperatur °C	Brennen min	Vacuum
1	450	1	45	850	4	nein

Lagerung:

Trocken Lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.