

# Verarbeitungsempfehlung & technische Daten CupraPeek



## Technische Daten

**Ausgabedatum: 19.10.2018**

**Hersteller:** Whitepeaks Dental Solutions GmbH & Co. KG  
Langeheide 9 - 45239 Essen - Germany

**Produkt / Produkttyp:** **CupraPeek**

**Produktform:** Scheiben und Blöcke verschiedener Größe

**Materialtyp:** Polyetheretherketone (PEEK)

**CE-Kennzeichnung:** C € 0483

**Zusammensetzung (Masse-%):**  
Polyetheretherketone 100%

## **Technische Daten**

Biegefestigkeit nach Weibull	~ 186,6 MPa
Löslichkeit	~ -0,1 µg/mm <sup>3</sup>
Wasseraufnahme	~ 4,66 µg/mm <sup>3</sup>

## **Allgemeine Information:**

CupraPeek ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa - gekennzeichnet mit C € 0483.

## **Indikation:**

Aus CopraPeek kann permanenter, herausnehmbarer beziehungsweise bedingt herausnehmbarer (verschraubter) Zahnersatz hergestellt werden. Dies bedeutet, dass mit dem beschriebenen Material Kronen, Brücken, Modellgussprothesen, Sekundärteile, Überkonstruktionen bei kombiniertem Zahnersatz, implantatgestützte Vollkronen im Seitenzahnbereich und bedingt herausnehmbare, verschraubte Brücken realisierbar sind.

## **Verarbeitung:**

CupraPeek ist mit Hartmetallfräsern zu verarbeiten. Zum Heraustrennen der gefrästen Prothetik aus dem Fräsrohling, ist eine grobverzahnte Hartmetallfräse einzusetzen. Das Trennen der Haltestege ist ohne Anwendung von Druck vorzunehmen. Die Restaurationen können mit geeigneten Silikon-Polierer, Ziegenhaarbürsten und geeigneter Polierpaste (diamantiert) poliert werden.

## **Befestigung:**

Nach der Einprobe wird auf die mit 220 µm sandgestrahlte Kroneninnenfläche ein Composite Primer (Ambarino P60 Creamed, Visio.link Bredent, Z-Prime Plus Bisco) aufgetragen. Der Primer stellt den sicheren Verbund zwischen CopraPeek und dem Befestigungs-Composite her.

## **Verblendung:**

Verblendung: Geeignete Verblendmaterialien sind z. B. die Verblendkomposite Base Dentine und das Modelling Liquid der Firma VITA.

## **Entsorgung:**

CupraPeek Discs und Blöcke bestehen aus reinem Polyetheretherketone. Überreste können mit dem Gewerbemüll entsorgt werden. CopraPeek ist wasserunlöslich, inaktiv und birgt keine Gefahren für das Grundwasser.

## **Regeln:**

Mindest-Wanddicke: 0,6 mm  
Verbinderquerschnitte im Frontzahnbereich: 10 mm<sup>2</sup>  
Verbinderquerschnitte im Seitenzahnbereich: 16 mm<sup>2</sup>  
Im Seitenzahnbereich dürfen nicht mehr als zwei Zwischenglieder positioniert werden.

## **Lagerung:**

Kühl und trocken lagern.